

BRUXOGARD™ Flexível



PARA BRUXISMO LEVE

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Desenvolvido para o Bruxogard™ Flexível é indicado para pacientes com bruxismo moderado ou com menos que 12 anos.

O **Bruxogard™ Flexível** é um aparelho moldável que se encaixa no arco superior e tem boa retenção durante o sono.

É indicado para pacientes com bruxismo que estejam à procura de uma alternativa eficaz e de baixo custo.

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN DO BRUXOGARD™ FLEXÍVEL



- Confeção em um material- para oferecer conforto máximo ao paciente.
- Moldagem simples - em 1 minuto.
- Moldado por injeção- para uma excelente retenção

COMO O BRUXOGARD™ FLEXÍVEL FUNCIONA

BRUXISMO

O bruxismo é definido como o ranger ou apertar dos dentes. Em geral, é um hábito inconsciente que resulta de tensão ou ansiedade.

Problemas com as restaurações podem se tornar um pesadelo para pacientes com bruxismo. Desgaste oclusal, mobilidade, fratura de cúspide e sintomas na ATM são evidentes nestes casos. Resolver as causas do bruxismo vai muito além do tratamento odontológico. No entanto, limitar ou evitar maiores danos causados por este problema é o papel do dentista.

Os pacientes recebem opções limitadas de solução para seus sintomas de bruxismo. Durante anos, placas de cobertura total foram utilizadas para limitar os efeitos nocivos do bruxismo, mas elas são de difícil implantação e ajuste. Os pacientes relutam em relação aos custos e preferem conviver com o problema, muitas vezes gerando mais danos aos dentes.

BRUXOGARD™ FLEXÍVEL

O **Bruxogard™ Flexível** é um aparelho moldável que se encaixa ao arco superior para aumento da retenção e do conforto durante o sono. É indicado para pacientes com bruxismo que estejam à procura de uma alternativa eficaz e de baixo custo.

O **Bruxogard™** também funcionará como uma placa macia e plana para proteger a dentição e a ATM dos efeitos do bruxismo. Pode ser moldado em 1 minuto.

O **Bruxogard™ Flexível** pode ser utilizado para reduzir os sintomas graves do bruxismo sem a necessidade de aparelhos dentários de aplicação demorada. O aparelho pode ser moldado em menos de 4 minutos pelo dentista. As instruções de aplicação e uso estão na embalagem.

É um tratamento inicial de baixo custo, ideal para redução dos sintomas.

SELEÇÃO DE PACIENTES

O **Bruxogard™ Flexível** é indicado para pacientes com bruxismo moderado ou com menos que 12 anos.

O **Bruxogard™ Flexível** irá desgastar após um período de uso e, quando isto ocorrer, deve ser substituído. Em caso de desgaste rápido, o **Bruxogard™ Flexível** pode ser substituído por uma placa convencional de acrílico ou pelo **Bruxogard™ Rígido**.

Assim que o paciente notar os danos causados ao **Bruxogard™** devido a seus maus hábitos, tomará consciência de seu problema e ficará mais motivado para procurar um tratamento.

- Fácil de moldar.
- Ajusta-se a qualquer tamanho de arcada: de pacientes a partir de 8 anos até qualquer idade.
- Proteção imediata para bruxismo – barreira efetiva entre os dentes superiores e inferiores.
- Base plana projetada para proteger os dentes e maxilares dos efeitos do bruxismo.
- Pode ser moldável em apenas um minuto.
- Usado durante o dia ou a noite (quando necessário).
- Moldagem personalizada proporciona excelente retenção durante o sono.

BRUXOGARD™ Rígido



PARA BRUXISMO SEVERO


UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Desenvolvido para O Bruxogard™ Rígido foi projetado para pacientes com sintomas graves de bruxismo e que desgastam rapidamente a versão flexível do Bruxogard™.

O **Bruxogard™ Rígido** é indicado para reduzir os sintomas do bruxismo forte, sem a necessidade de aparelhos dentários de aplicação demorada.

Pode ser adaptado em menos de 4 minutos por qualquer profissional da área odontológica.

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN DO BRUXOGARD™ RÍGIDO

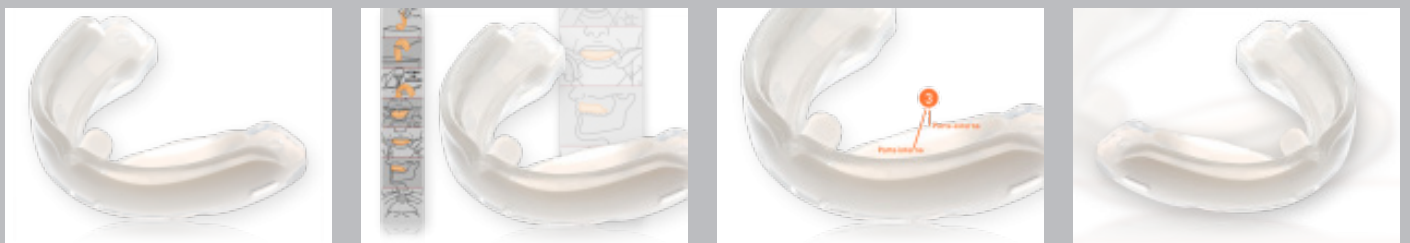

- Confeção em dois materiais- para máxima proteção.
- Moldagem simples- em 2 minutos.
- Parte interna rígida e exterior moldável- para reduzir o volume dentro da boca.
- Moldado por injeção - para uma excelente retenção.

COMO O BRUXOGARD™ RÍGIDO FUNCIONA

BRUXISMO

O bruxismo é definido como o ranger ou apertar dos dentes. Em geral, é um hábito inconsciente que resulta de tensão ou ansiedade.

Problemas com as restaurações podem se tornar um pesadelo para pacientes com bruxismo. Desgaste oclusal, mobilidade, fratura de cúspide e sintomas na ATM são evidentes nestes casos. Resolver as causas do bruxismo vai muito além do tratamento odontológico. No entanto, limitar ou evitar maiores danos causados por este problema é o papel do dentista.

Os pacientes recebem opções limitadas de solução para seus sintomas de bruxismo. Durante anos, placas de cobertura total foram utilizadas para limitar os efeitos nocivos do bruxismo, mas elas são de difícil implantação e ajuste. Os pacientes reutam em relação aos custos e preferem conviver com o problema, muitas vezes gerando mais danos aos dentes.

BRUXOGARD™ RÍGIDO

O **Bruxogard™ Rígido** pode ser utilizado para reduzir os sintomas graves do bruxismo sem a necessidade de aparelhos dentários de aplicação demorada.

O aparelho pode ser moldado em menos de 4 minutos pelo dentista. As instruções de aplicação e uso estão na embalagem.

É um tratamento inicial de baixo custo, ideal para redução dos sintomas.

SELEÇÃO DE PACIENTES

O **Bruxogard™ Rígido** foi projetado para pacientes que apresentam sintomas graves de bruxismo e que desgastam rapidamente a versão flexível do **Bruxogard™**.

O **Bruxogard™ Rígido** irá desgastar após um período de uso e, quando isto ocorrer, deve ser substituído. Em caso de desgaste rápido, o **Bruxogard™ Flexível** pode ser substituído por uma placa convencional de acrílico ou pelo **Bruxogard™ Rígido**.

Assim que o paciente notar os danos causados ao **Bruxogard™** devido a seus maus hábitos, tomará consciência de seu problema e ficará mais motivado para procurar um tratamento.

- Somente para uso noturno.
- Fácil de moldar.
- Para pacientes adultos (a partir de 12 anos).
- Confeção em dois materiais com uma parte externa flexível: permite ótimo ajuste, de forma imediata.
- Design para pacientes com bruxismo forte que desgastam aparelhos flexíveis em pouco tempo.
- Proporciona uma barreira efetiva entre os dentes superiores e inferiores.
- Moldagem personalizada proporciona excelente retenção na arcada superior.
- Parte interna rígida proporciona maior durabilidade ao aparelho.